# 新登場!

20L バケツが楽々入る XL2 登場! 幅広で入れやすくなりました! 簡単チャックスライダー付きでより便利に。

現場の声から生まれた ホルマリンバケツ用袋



# HistoPack X L 3 J-7

ヒストパック エックスエル


- ・特殊素材で臭い漏れを防止
- ・開閉簡単なチャック袋タイプ
- ・透明な袋で中の識別タグが見やすい
- ・そのまま容器の積み重ねも可能

HistoPack XL シリーズは、ホルム アルデヒドを逃がさない臓器保存袋 「HistoPack シリーズ」をバケツごと 封入できるように開発した大型袋です。 市販のビニール袋と比較したテストで その密閉性を証明しています。

#### 8~20Lまでの丸型・角型 密閉バケツ対応



〔サイズ目安〕 XL1:8~12L バケツ XL 2:20L バケツ

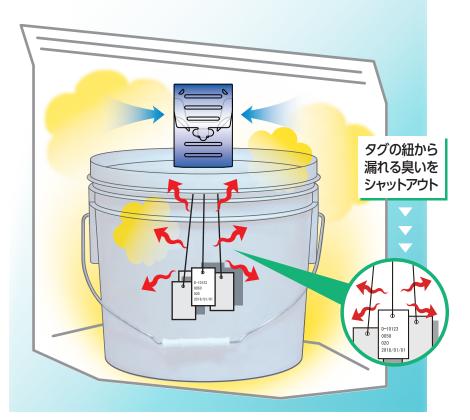

### (1) こんな場所で使えます!



切り出し室





臓器保管室

#### ● 実験概要

同サイズにした HistoPack XL と市販のビニール袋にホルマリンをしみこませた布を入れてヒートシールし、更にそのそれぞれに密閉袋をかぶせ、密閉袋内に漏れだすホルムアルデヒドの濃度を時間ごとに測定した。(密閉袋サイズは300cm²で実施) 〔試験結果〕

ビニール袋では 24 時間で100ppm を記録したが、 HistoPack XL ではさらに5日間経過しても 0.1ppm 以下 を維持し、臭いも感じることもなかった。

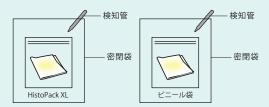

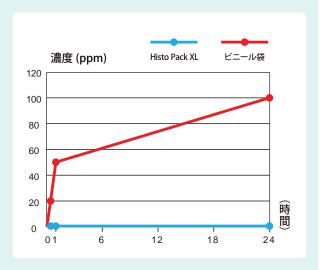

#### ● 使用方法



っ 容器にフタをして 入れる




チャックを閉じ、左右の 余った端をサイドテー プで留める



赤線部分を横にひっ ぱり、袋上部を倒す



サイドテープは管 理用ラベルとして も使えます

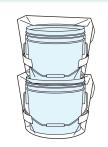

袋に入れた状態で 積み重ね可能 (チャック部分を重ねない ようご注意ください)

#### ● 商品詳細

※本製品に直接液体や検体を入れないでください。

#### [通常仕様]

商品コード	商品名	サイズ	包装単位
705-400-2	HistoPack XL1	チャック下 800×570mm	10 枚
705-400-3	HISTOPACK ALT		50 枚
705-410-2	HistoPack XL2	チャック下 920×650mm	10 枚
705-410-3	THISTOT GON ALZ		50 枚

#### 〔キャッチホルム付〕

※サイズは通常仕様と同一

商品コード	商品名	包装単位	
705-401-1	HistoPack XI 1	10枚(キャッチホルムマルチタイプ1個付)	
705-401-2	TIISTOF ACK ALT	50枚(キャッチホルムマルチタイプ1個付)	
705-411-1	5	10枚(キャッチホルムマルチタイプ1個付)	
705-411-2	HistoPack XL2	50枚(キャッチホルムマルチタイプ1個付)	

#### ● ホルムアルデヒド吸着剤のセットタイプ

## two still

マルチタイプ

袋内のホルマリン臭の 軽減に! XL シリーズ で封じ込めた臭いを 吸着して軽減



[キャッチホルムマルチタイプのみも販売中]

商品コード	商品名	包装単位	サイズ
310-103-1	キャッチホルム マルチタイプ	5個 (マルチケース入り) 2個と詰替用3個)	15.5×10.5× 2.5cm
310-104-1		10 個 (マルチケース入り) 4個と詰替用6個)	

改良により、仕様など一部変更する場合がありますのでご了承ください。

発売元

## 株式会社 ファルマ



東京営業所 〒151-0065 東京都渋谷区大山町36-7 TEL 03(6407)2570 FAX 03(3465)0300 大阪営業所 〒532-0003 大阪市淀川区宮原5-1-3 TEL 06(6397)2411 FAX 06(6397)2852 http://www.falma.co.jp

1805001